

## ADL Viskoschaum Sitzkissen

### Produktbeschreibung

- Das „ADL Viskoschaum Sitzkissen“ ist ein Viskoelastische-Schaumstoff Sitzkissen, das zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III eingesetzt wird. Geeignet im Homecare- und Objektbereich für Patienten mit einem Körpergewicht zwischen 30 und 135 kg, je nach Kissengröße (siehe Angaben unten!).

### Empfehlungen

- Die erste prophylaktische Maßnahme gegen Dekubitus besteht darin, die Druckpunkte des Körpers auf dem Sitzkissen durchschnittlich alle drei Stunden zu verändern, so dass eine zu langandauernde Komprimierung der Blutgefäße an Knochenvorsprüngen reduziert und die Durchblutung des Gewebes ermöglicht wird. Ein möglicher Kissenbezug nicht fest einschlagen, um die Wirksamkeit des Sitzkissens zu behalten.

### Lieferumfang

- 1 x ADL Viskoschaum Sitzkissen
- 1 x Abnehmbarer PU-Bezug

### Installation

- Das Sitzkissen wird einsatzbereit geliefert.
- Positionieren Sie das Sitzkissen mit der gewellten, anatomisch geformten Seite nach oben.
- Achten Sie darauf, dass der sichtbare und auch fühlbare Sitzkissenausschnitt für eine verbesserte Dekubitus-Vorbeugung im Bereich des Steißbeins muss nach hinten zur Lehne des Stuhls positioniert werden

### Indikationen

- Bei hohem Dekubitusrisiko / Grad III gemäß Skala und ärztlicher Einschätzung
- Bestehender Dekubitus: nach ärztlicher Beratung

### Kontraindikationen

- Keine

### Reinigung/ Desinfektion

- Vor Wiedereinsatz reinigen und desinfizieren.
- PU Bezug ist bis 95 °C waschbar und bis 50 °C trocknergeeignet. Der Bezug kann nach einem thermischen Verfahren aufbereitet werden. Auch Dampfsterilisationsverfahren können durchgeführt werden.



- Sitzkissen: Während der Benutzung sollte das Sitzkissen einmal wöchentlich mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Hierfür kann ein mildes, handelsübliches Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet werden. Keine aldehydhaltigen Mittel verwenden. Eine Wischdesinfektion ist ebenfalls durchführbar, wenn die Wirkungsspektren beachtet werden und die Einwirkzeit eingehalten wird.

### Desinfektionsmittelempfehlungen

- BACILLOCID RASANT (BODE), BACILLOL AF (BODE), BACILLOCID SPEZIAL (BODE), KOHR SOLIN FF (BODE), KOHR SOLIN (BODE), MICRO-BAC FORTE (BODE), DISMOZON PUR (BODE), INCIDIN FOAM (ECOLAB), INDUR DES (ECOLAB)

### Sicherheit

- Beachten Sie bitte eine Armlehne-/Seitengitter-Mindesthöhe, wenn das Sitzkissen in Stühlen mit Armlehnen/Seitengittern zur Anwendung kommt.

### Hinweise zu dem Schutzbezug

- Das Sitzkissen sollte grundsätzlich mit dem mitgelieferten, vollständig trockenen Schutzbezug bezogen werden. Der wiederholte Kontakt des Schaumstoffs mit Flüssigkeiten verändert die Fähigkeit, den Körper auf gleichmäßige und dauerhafte Weise zu schützen und die Werte des Auflagedrucks zu senken.
- Der Schutzbezug ist abnehmbar durch einen Reißverschluss.
- Direkten Kontakt des Schutzbezuges mit scheuernden, ätzenden Produkten oder Lösungsmitteln sowie spitzen, schneidenden Gegenständen ist zu vermeiden.
- Den normalen Verschleiß des Schutzbezuges regelmäßig prüfen und diesen bei Beschädigungen ersetzen (Loch, Riss, verändertes Aussehen der Oberfläche, Transparenzeffekt bei Lichteinwirkung).

### Hinweise zu der Sitzkissen

- Direkten Kontakt des Sitzkissens mit spitzen, schneidenden Gegenständen ist zu vermeiden.
- Längeren Kontakt des Schaumstoffes mit Feuchtigkeit vermeiden.
- Regelmäßig eine Sichtkontrolle des Schaumstoffes durchführen; sichtbare Mulden im Material oder eine ungleichmäßige oder verlangsamte Rückkehr des Schaumstoffes in die ursprüngliche Form sind Alterserscheinungen, welche die Fähigkeiten des Sitzkissens zur Vorbeugung gegen Dekubitus beeinträchtigen.
- Sitzkissen nur im unversehrten Zustand verwenden.
- Im Falle eines dauerhaften, unbeabsichtigten und irreparablen Nachgebens des Materials, so dass die ursprüngliche Funktion beeinträchtigt ist, sollten Sie sich an Ihren Händler wenden.
- PU-Vollbezug schwer entflammbar nach Crib 5.

### Aufbewahrung

- Bitte nicht in einer feuchten Umgebung dauerhaft aufbewahren.
- Das Sitzkissen ist für Transportzwecke in Folie verpackt.
- Farbveränderungen bei Schaum sind technisch bzw. aufgrund von Lichteinflüssen bedingt und verändern nicht die Qualität des Produktes, sie stellen daher keinen Mangel dar.

### Garantie

- Die Garantie für das Sitzkissen beträgt 3 Jahre. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum des Produkts bei Ihrem Händler. Im Fall der Nutzung durch einen Einzelpatienten betrifft die Garantie das Sitzkissen, sowie den dazugehörigen Schutzbezug. Im Fall der Nutzung durch mehrere Patienten ist die Garantiedauer für den Schutzbezug auf ein Jahr begrenzt. Die Garantie deckt nicht den normalen Verschleiß des Produkts und seines Schutzbezugs ab und tritt nicht anstelle der rechtlichen Garantie ein. Kontaktieren Sie Ihren Händler unter Vorlage des beanstandeten Produkts. Dieser führt die notwendigen Schritte gegenüber unserer Firma aus, damit entweder eine Reparatur oder ein Umtausch erfolgen kann. Unsere Pflegehinweise und Garantiebedingungen sind zu finden auf [www.adl-gmbh.de](http://www.adl-gmbh.de)

### Hinweise zu den Materialien:

- Sitzkissen: Viskoschaum
- Bezug: Polyurethan

## Lebensdauer

- Beisachgemäßem Gebrauch, Reinigung und Desinfektion zur Wiederverwendung gemäß unseren Empfehlungen ist eine Lebensdauer von 3 Jahren oder bis zu 10 Wiederverwendungen. Verschleißteile wie Bezüge sind davon ausgeschlossen. Die Lagerungsdauer beim Kunden darf im originalverpacktem Zustand 3 Monate nicht überschreiten. Im ausgebreitetem Zustand erweitert sich die Lagerungsdauer beim Kunden auf max. 2 Jahre.

## Abmessungen und Gewicht im gebrauchsfertigen Zustand:

Art.-Nr.	Abmessungen in cm (B x T x H)**:	Gewicht des Sitzkissens:	Empfohlenes Patientengewicht:
180 276	38 x 41 x 6-9*	0,9 kg	30-90 kg
180 277	40 x 41 x 6-9*	1,0 kg	30-90 kg
180 278	43 x 43 x 6-9*	1,0 kg	30-100 kg
180 280	45 x 44 x 6-9*	1,1 kg	30-120 kg
182 011	43 x 47 x 6-9*	1,1 kg	30-120 kg
180 281	50 x 44 x 6-9*	1,2 kg	30-135 kg

\* Die Höhe variiert zwischen 6 und 9 cm aufgrund der anatomisch angepassten Form.

\*\* Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche. Die tatsächliche Sitzfläche ist aufgrund der Abrundungen der Schaumkanten um ca. 1-2 cm geringer als die Grundfläche.

Raumgewicht: 70 kg/m<sup>3</sup>

Stauchhärte: 3,8 kPa

Mikroklima: Klasse K

Druckentlastung:

Bei Belastung mit 80 kg: Klasse G

## Allgemeine Hinweise

- Dieses Medizinprodukt ist nicht für die Anwendung durch blinde oder sehbehinderte Patienten geeignet. Die sichere und ordnungsgemäße Nutzung setzt die Fähigkeit voraus, visuelle Informationen auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung oder auf begleitenden Materialien zuverlässig erkennen und interpretieren zu können.

Blinde oder sehbehinderte Personen könnten dadurch in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sein, wichtige sicherheitsrelevante Informationen wahrzunehmen, was zu einer unsachgemäßen Anwendung oder zu einem erhöhten Risiko für unerwünschte Ereignisse führen kann.

Sollte eine sehbehinderte oder blinde Person dennoch mit dem Produkt interagieren müssen, ist die Anwendung nur mit Unterstützung einer sehenden, geschulten Betreuungsperson zulässig.