

Rhea

Produktbeschreibung

- Die Rhea Matratze ist eine Schaumstoffmatratze, die zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittleren Risiko / Grad II eingesetzt wird. Geeignet für Personen mit einem Gewicht zwischen 20 und 130 kg (in Liegeposition).

Empfehlungen

- Die erste prophylaktische Maßnahme gegen Dekubitus bei Bettlägerigkeit besteht darin, die Druckpunkte des Körpers auf der Matratze durchschnittlich alle 2 Stunden zu verändern, so dass eine zu lang andauernde Komprimierung der Blutgefäße an Knochenvorsprünge reduziert und die Durchblutung des Gewebes ermöglicht wird. Die Bettwäsche nicht fest einschlagen, um die Wirksamkeit der Matratze zu behalten.

Lieferumfang

- 1 x Rhea Matratze
- 1 x Bezug (Baumwolltrikot-/ PU-Bezug)

Installation

- Bitte legen Sie die Matratze mit der welligen Seite nach oben auf den Lattenrost.
- Die Matratze ist für Transportzwecke in Folie vakuumverschweißt und gerollt. Nach dem Auspacken empfiehlt es sich die Matratze ca. 30-60 min liegen zu lassen bevor sie in Gebrauch genommen wird. Bei kalten Temperaturen kann sich das Zeitfenster gegebenenfalls noch verlängern.
- Die Matratze wird einsatzbereit geliefert.
- Positionieren Sie die Matratze mit der dunkelblauen Seite des Bezuges nach oben.

Indikationen

- Geringes bis mittleres Dekubitusrisiko gemäß Skala und ärztlicher Einschätzung.
- Bestehender Dekubitus: nach ärztlicher Beratung

Kontraindikationen

- nicht bekannt

Reinigung/ Desinfektion

- Vor Wiedereinsatz reinigen und desinfizieren.
- PU-Schutzbezug ist bis 95° Grad waschbar und bis 50° Grad trocknergeeignet. Der Bezug kann nach einem thermischen Verfahren aufbereitet werden. Auch Dampfdesinfektionen können durchgeführt werden.



- Der Baumwolltrikotbezug ist bis 30° Grad waschbar und schonend trocknergeeignet.
- Matratze: Während der Benutzung sollte die Matratze einmal wöchentlich mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Hierfür kann ein mildes, handelsübliches Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet werden. Keine aldehydhaltigen Mittel verwenden. Eine Wischdesinfektion ist ebenfalls durchführbar, wenn die Wirkungsspektren beachtet und die Einwirkzeit eingehalten wird.

Desinfektionsmittelempfehlungen

- BACILLOCID RASANT, - SPEZIAL, BACILLOL AF, KOHRSOLIN FF, KOHRSOLIN, MICROBAC FORTE, DISMOZON PUR (BODE), INCIDIN FOAM, INDUR DES (ECOLAB).

Sicherheit

- Beachten Sie bitte eine Seitengitter-Mindesthöhe von 22 cm, wenn die Matratze an Betten mit Seitengittern zur Anwendung kommt.
- DIN EN 1970:2000 (Norm für Seitengitterabmessungen).
- Keine Einschränkung bei verstellbarer Liegefläche

Hinweise zu dem Schutzbezug

- Die Matratze (Matratzenauflage) sollte grundsätzlich mit dem mitgelieferten, vollständig trockenen Schutzbezug bezogen werden. Der wiederholte Kontakt des Schaumstoffes mit Flüssigkeiten verändert die Fähigkeit, den Körper auf gleichmäßige und dauerhafte Weise zu schützen und die Werte des Auflagedrucks zu senken.
- Der Schutzbezug ist abnehmbar durch einseitigen Reißverschluss am Fußende.
- Direkten Kontakt des Schutzbezuges mit scheuernden, ätzenden Produkten oder Lösungsmittel sowie spitzen, schneidenden Gegenstände ist zu vermeiden.
- Den Verschleiß des Schutzbezuges regelmäßig prüfen und diesen bei Beschädigung ersetzen (Loch, Riss, verändertes Aussehen der Oberfläche, Transparenzeffekt bei Lichteinwirkung).

Hinweise zu der Matratze

- Direkter Kontakt der Matratze mit spitzen, schneidenden Gegenständen und ein starkes Ziehen am Schaumstoffkörper ist zu vermeiden.
- Längeren Kontakt des Schaumstoffes mit Feuchtigkeit vermeiden.
- Regelmäßig eine Sichtkontrolle des Schaumstoffes durchführen; Sichtbare Mulden im Material oder eine ungleichmäßige oder verlangsamte Rückkehr des Schaumstoffes in die ursprüngliche Form sind Alterserscheinungen, welche die Fähigkeit der Matratze zur Vorbeugung gegen Dekubitus beeinträchtigen.
- Matratze nur im unversehrten Zustand verwenden.
- Im Falle eines dauerhaften, unbeabsichtigten und irreparablen Nachgebens des Materials, so dass die ursprüngliche Funktion beeinträchtigt ist, sollten Sie sich an Ihren Händler wenden.

Aufbewahrung

- Diese Matratze der ADL GmbH ist für Transportzwecke in Folie Vakuum verschweißt und gerollt. Bitte beachten Sie, die Matratze nicht dauerhaft im gerollten Zustand zu lagern. Spätestens nach 3 Monaten ab Lieferdatum muss die Matratze in eine glatte und ungerollte Lagerung gebracht werden. Bei für den Transport gerollten Matratzen verändert sich vorübergehend das Ausgangsmaß. Farbveränderungen bei Matratzen-schäumen sind technisch bzw. aufgrund von Lichteinflüssen bedingt und verändern nicht die Qualität des Produktes, sie stellen daher keinen Mangel dar.

Entsorgung

- Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, es sind die örtlichen Vorschriften für die Müllentsorgung zu beachten.

Lebensdauer

- Bei sachgemäßem Gebrauch, Reinigung und Desinfektion zur Wiederverwendung gemäß unseren Empfehlungen ist eine Lebensdauer von 3 Jahren oder bis zu 10 Wiederverwendungen. Verschleißteile wie Bezüge sind davon ausgeschlossen. Die Lagerungsdauer beim Kunden darf im originalverpacktem Zustand 3 Monate nicht überschreiten. Im ausgebreitetem Zustand erweitert sich die Lagerungsdauer beim Kunden auf max. 2 Jahre.

Garantie

- Die Garantie für die Matratze beträgt 2 Jahre. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum des Produkts bei Ihrem Händler. Im Fall der Nutzung durch einen Einzelpatienten betrifft die Garantie der Matratze (Matratzenauflage), sowie den dazugehörigen Schutzbezug. Im Falle der Nutzung durch mehrere Patienten ist die Garantiedauer für den Schutzbezug auf ein Jahr begrenzt. Die Garantie deckt nicht den normalen Verschleiß des Produktes und seines Schutzbezugs ab, und tritt nicht anstelle der rechtlichen Gewährleistung ein. Kontaktieren Sie Ihren Händler unter Vorlage des beanstandeten Produkts. Dieser führt die notwendigen Schritte aus, damit entweder eine Reparatur oder ein Austausch erfolgen kann.

- Unsere Pflegehinweise und Garantiebedingungen sind zu finden auf www.adl-gmbh.de.

Hinweise zu den Materialien:

Matratze: PU-Kaltschaum

Bezug: Polyurethan, Bauwolltrikot

Abmessungen und Gewicht im gebrauchsfertigen Zustand:

Matratzen

- 200 x 90 x 12 cm (Länge x Breite x Höhe)

- 200 x 100 x 12 cm (Länge x Breite x Höhe)

Raumgewicht

- 30 kg/m³

Stauchhärten

- 3,3 kPa

Gewicht der Matratze: 5,5kg

Gewicht PU Bezug: 0,9 kg

Gewicht Rhea: 6,1kg (100er Variante)

Gewicht PU Bezug: 1,0 kg (100er Variante)

Mikroklima: Klasse H

Druckentlastung:

Bei Belastung mit 80 kg = Klasse G,

bei Belastung mit 130 kg = Klasse G

Allgemeine Hinweise

- Dieses Medizinprodukt ist nicht für die Anwendung durch blinde oder sehbehinderte Patienten geeignet. Die sichere und ordnungsgemäße Nutzung setzt die Fähigkeit voraus, visuelle Informationen auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung oder auf begleitenden Materialien zuverlässig erkennen und interpretieren zu können.

Blinde oder sehbehinderte Personen könnten dadurch in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sein, wichtige sicherheitsrelevante Informationen wahrzunehmen, was zu einer unsachgemäßen Anwendung oder zu einem erhöhten Risiko für unerwünschte Ereignisse führen kann.

Sollte eine sehbehinderte oder blinde Person dennoch mit dem Produkt interagieren müssen, ist die Anwendung nur mit Unterstützung einer sehenden, geschulten Betreuungsperson zulässig.